



Benutzerinformation & Gebrauchsanweisung

PlexyCap – Keim Gesichtsschutzschild

1. Einführung, Anwendungsbereich

PlexyCap – das Gesichtsschutzschild der **Keim Kunststoffe GmbH**, ist eine persönliche Schutzausrüstung (PSA) entsprechend der PSA Verordnung (EU) 2016/425 und entspricht einem Medizinprodukt der Klasse 1 nach der Medizinprodukteverordnung EU) 2017/745, das bei sachgemäßer Verwendung vor Tröpfchen und Spritzern von Flüssigkeiten schützt. Dies verringert das Risiko einer Tröpfcheninfektion. Aufgrund seines Designs ist ein vollständiger Schutz gegen Viren, Bakterien oder andere biologische Agenzien nur in begrenztem Umfang gegeben. Es kann mit Atemmasken kombiniert werden (Nicht steril). **PlexyCap** ist für Anwendungen im medizinischen Bereich, der Pflege, dem Rettungswesen und anderen von COVID-19 betroffenen Arbeitsgebieten, welche den gleichen Schutzzweck benötigen, zu verwenden.

Die EU-Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie auf unserer Webseite <https://keim-kunststoffe.de/plexycap-konformitaetserklaerung/>



2. Warnungen

- **PlexyCap** SCHÜTZT NICHT VOR MECHANISCHEN EINWIRKUNGEN!
- Unangemessene Verpackung kann das Schutzniveau verringern. Beachten Sie deshalb die Anweisungen gemäß Kapitel 5
- Werkstoffe, die in Kontakt mit der Haut des Trägers kommen können, könnten bei empfindlichen Personen allergische Reaktionen hervorrufen.

Verwenden Sie **PlexyCap** nicht mehr, wenn es:

- zerkratzt, rissig oder anderweitig beschädigt ist,
- Änderungen in Form und Farbe zeigt,
- Chemikalien, Ölen oder Fetten ausgesetzt war,
- großer Hitze oder über lange Zeit der Sonne ausgesetzt war*

* Schäden sind für den Endbenutzer möglicherweise nicht sichtbar.

3. Lieferumfang

- Sichtscheibe
- Kappe oder Schirmmütze

4.

VerwendungPlexiCap kann entweder mit der mitgelieferten Kappe bzw. Schirmmütze oder einer beliebigen anderen Kappe mit gutem Sitz und einem soliden Schild von bis zu 20 cm getragen werden. Den Schild der Kappe bzw. Schirmmütze so weit wie möglich durch den Schlitz in der **PlexyCap** durchführen – fertig!

Weitere Informationen finden Sie unter

https://youtu.be/gK_xdNa10tc



Prüfen Sie den angenehmen, aber sicheren Sitz Ihrer **PlexiCap**, bevor Sie einen potentiell kontaminierten Bereich betreten. Stellen Sie sicher, dass im Gesichtsbereich keine Haare oder möglicherweise kontaminierte Kleidungsstücke oder andere kontaminierte PSA unter der **PlexyCap** sind.

Wenn Sie **PlexiCap** in Kombination mit anderer PSA nutzen, befolgen Sie sorgfältig die Anweisungen der anderen PSA-Hersteller. Nehmen **PlexiCap** vorsichtig ab, bevor Sie einen potentiell kontaminierten Bereich verlassen, vermeiden Sie den Kontakt mit kontaminierten Oberflächen und desinfizieren oder entsorgen Sie **PlexiCap** ordnungsgemäß. Zur Reinigung verwenden Sie bitte milde Fensterreinigungsmittel, zur Desinfektion Isopropyl-Alkohol in einer Konzentration von mindestens 80% (Volumen-Prozent). Bitte verwenden Sie keine Bio-Alkohole oder Spiritus!

Achten Sie auch auf eine der Anwendung entsprechende Reinigung und Desinfektion der Kappe oder Schirmmütze!



5. Lagerung

Für beste Ergebnisse bewahren Sie das **PlexyCap** in der von **Keim** verwendeten Verpackung auf. (HINWEIS: Verschiedene andere Verpackungsmaterialien enthalten möglicherweise Weichmacher oder Lösungsmittel, die die Eigenschaften der **PlexyCap** beeinträchtigen können.) Lagern Sie das **PlexyCap** vor Sonnenlicht oder künstlichem UV-Licht geschützt bis zu 3 Jahre in einer sauberen, trockenen Umgebung bei einer Temperatur zwischen -5°C and +35°C.

6. Normen und CE-Kennzeichnung

PlexyCap ist zertifiziert nach EN166:2001 - teilweise angewendet, entsprechend den speziellen Anforderungen zum Schutz vor dem SARS-CoV-2-Virus - mit der Kennzeichnung:

HKK 1 3 CE

mit folgenden Bedeutungen

- HKK** Herstellerkennung (Hans Keim Kunststoffe GmbH)
1 optische Klasse 1
3 Schutz gegen Tropfen und Spritzer von Flüssigkeiten
CE CE-Kennzeichnung gem. PSA Verordnung (EU) 2016/425, Artikel 17 für Kategorie II Produkte.

7. Wichtige Adressen

Hersteller	Benannte Stelle
Hans Keim Kunststoffe GmbH Im Lachengrund 45-47, 78658 Zimmern ob Rottweil, Germany Phone.: +49 (0)74192840 Fax: +49 (0)741928450 info@keim-kunststoffe.de www.keim-kunststoffe.de	ECS GmbH Hüttfeldstr. 50 73430 Aalen Germany Phone +49 7361 9757396 Fax. +49 7361 5562434 Email: info@ecs-eyesafe.de Web: www.ecs-eyesafe.de

8. Gefährdungsbeurteilung

Zur Auswahl eines geeigneten Augen- und Gesichtsschutzes muss eine Gefährdungsbeurteilung von gut ausgebildeten Fachleuten durchgeführt werden. Der Augen- und Gesichtsschutz darf niemals in Umgebungen mit einer höheren Gefährdungsbeurteilung verwendet werden als mit der Produktkennzeichnung (Kap. 6) angegeben. Gemäß dieser Gefährdungsbeurteilung muss **PlexyCap** ggf. mit weiterer PSA, wie einem Overall, einer Atemschutzmaske, einer Korbbrille, Handschuhen usw. kombiniert werden.

9. Erklärung zur REACH-Verordnung

Der Hersteller versichert, dass das hier beschriebene Produkt und dessen Verpackung keine nach Artikel 57 der REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 aufzunehmenden Stoffe in einer Konzentration von mehr als 0,1 Massenprozent (w/w) gemäß Artikel 33 dieser Verordnung enthalten.

10. Entsorgung

Nach Verwendung ist **PlexyCap** als "Kontaminiertes, gemischtes Kunststoffprodukte" zu entsorgen.